

## Режимы воздействия прибора ENART 911 уровень L1 и уровень L2

Режимы воздействия	Уровни прибора	
	911-L1	911-L2
<b>1. DIAG 1</b> - Диагностический/ Индивидуально дозированный режим, для нахождения триггерных зон на поверхности тела с целью их последующей обработки (регулируемый)	+	+
<b>2. DIAG 2</b> - Режим скрининга, обеспечивает диагностический скрининг исследуемой зоны (регулируемый)	-	+
<b>3. CONST</b> – Непрерывный режим универсального воздействия , используется при наличии выраженных локальных симптомов, при неотложных случаях и при необходимости обработки обширных зон (регулируемый)	+	+
<b>4. ΔCONST</b> - Непрерывный режим специального воздействия для ускоренного анализа и обработки обследуемой зоны (регулируемый)	+	+
<b>5. MCONST</b> - Непрерывный многофункциональный режим воздействия - для лечения открытых ран и других повреждений кожного покрова (регулируемый)	+	+
<b>6. INTVL</b> - Интервальный режим воздействия - для воздействия на атонические (функционально ослабленные) внутренние органы, при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, как хронических, так и острых и для стимуляции сокращения мышц (регулируемый)	+	+
<b>7. FMVAR</b> - переменном режиме воздействия с высокой динамикой изменения частоты импульсов (не регулируемый)	+	+
<b>8. AM</b> - Амплитудно-модулированный режим воздействия (регулируемый)	-	+
<b>9. AMFM</b> - Режим модуляции амплитуды первой фазы импульса и частоты (регулируемый)	-	+
<b>10. FMSW</b> - Переменный режим воздействия с высокой динамикой изменения параметров выходного сигнала (регулируемый)	-	+
<b>11. BEE</b> - Режим кратковременного воздействия (укус пчелы) (регулируемый)	-	+
<b>12. EM</b> – режим универсального воздействия с автоматически изменяющейся частотой импульса в зависимости от реакции организма по обратной биологической связи (не регулируемый).	-	+
<b>13. SC</b> - режим универсального воздействия для лечения широкого спектра заболеваний, как хронических, так и острых, заболеваний внутренних органов и при травмах (не регулируемый)	-	+
<b>14. CS</b> - режим специального воздействия при заболеваниях ЦНС, в косметологии, заболеваниях периферической нервной системы и для обработки зон верхних и нижних конечностей (нерегулируемый)	-	+
<b>15.SM</b> – режим высокой амплитуды воздействующего импульса - при костно-мышечных заболеваниях (нерегулируемый)	-	+
<b>16. EN</b> - режим универсального воздействия с автоматически изменяющейся амплитудой первой фазы импульса в зависимости от реакции организма по обратной биологической связи (нерегулируемый)	-	+
<b>17. IF</b> – Режим инфранизких частот - для усиления терапевтического эффекта (регулируемый)	-	+
<b>18. QS</b> – режим «Быстрый Старт» - специализированные программы в виде 10 подрежимов	-	+